

enziSurf<sup>®</sup>  
HIGH



Clean



# enziSurf<sup>®</sup> HIGH

Multi-enzymatische schuimspray voor het reinigen van hoge oppervlakken in de zorgsector (ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, medische, tandheelkundige en dierenartse praktijken).

100% Clean

- **MULTI-SURFACE** Deze multifunctionele formule reinigt alle wasbare oppervlakken zonder sporen na te laten. Niet bijtend. Compatibel met alle materialen.
- **SNEL** 3 miljoen keer per seconde! De enzymen snijden en breken de grond met een adembenemende snelheid in micro-residuen.
- **«DEEP CLEAN»** Efficiënte en moeiteloze verwijdering van zichtbare en onzichtbare organische grond dankzij de werking van enzymen.
- **«VOORKOMEN»** Het enzymen anti-afzetting effect, voorkomt dat de bodem te snel neerslaat.
- **«NATUURLIJK»** Ingrediënten van natuurlijke oorsprong: zonder fosfaten, bleekmiddel of ammoniak. Biedt een gezond alternatief voor conventioneel reinigen. Bestrijdt geurtjes.

## Toepassingen

Hoge oppervlakken

- Operatietafel
- Werkplan
- kooien
- karren
- Deurklinken
- Stoelen
- wastafels
- Bureaus
- Countertops



## Kenmerken van het product

- Deep clean
- Compatibel met alle materialen
- Zeer actief enzymatisch complex
- Klaar voor gebruik
- Zoete sinaasappel geur
- Biologische afbreekbaarheid  $\geq$  95% (OECD 302B)



## Gebruiksaanwijzingen

Reiniging is een essentiële infectiecontrole stap.

**1.** Met de spray rechtstreeks op het te reinigen oppervlak aanbrengen. Verdeel het product met een schone doek. Laat tenminste handelen **2 minuten**.


**2.** Veeg met een droge, schone doek het hele behandelde gebied af om te verwijderen zwevende grond.

**3.** Laat drogen.

**OPMERKING:** zorg ervoor dat u de hoge oppervlakken die in contact met patiënten zijn, regelmatig schoonmaakt. Naast het reinigen wordt aanbevolen om te desinfecteren om het ontsmettingsproces te voltooien.

Echter, de Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om spaarzaam desinfectie te gebruiken om microbiële resistentie (AMR) te bestrijden.

**Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering :** Kan naar een waterzuiveringsinstallatie afgevoerd worden.  
**Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen:** Als de containers volkomen leeg zijn, zijn deze recycleerbaar.

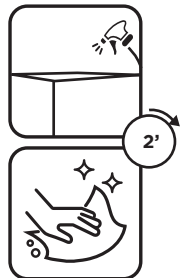

## Chemische eigenschappen

Uitzien: kleurloze vloeistof  
white foam when sprayed

## Voorzorgsmaatregelen

Opslag in gesloten originele verpakking, tussen + 4 ° C en + 25 ° C

**Levensduur:** 24 maanden na productie

## Bestanddelen

Samengesteld uit ecocertificeerde natuurlijke ingrediënten

Bevat geen kankerverwekkende, mutagene agentia, reproductietoxische stoffen of hormoon ontregelaars.

**Enzymatisch complex:**



protease (L)  
protease (S)  
amylase  
lipase

## Verpakking



Ref **OL52404**  
6 x 750ml

Refill  
Ref **OL52433**  
1 x 5 L



Natural



Biodegradable



Eco-friendly

Enzymes for patients' safety

Contact:

OneLife s.a.  
Avenue Albert Einstein, 15  
1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)  
+32 10 48 34 27 info@onelif-bf.com

onelif-bf.com



Made in Belgium