



DETECT & DISSOLVE
BIOFILM MATRIX

enziSurf[®] INTENSE

• ECO-FRIENDLY • MEDICAL DEVICE •




enziSurf® INTENSE

Zeer effectief, **geconcentreerd** multi-enzymatische decontaminatie reinigingsmiddel voor **dieptereiniging** van **kritische oppervlakken** (vloeren, operatiekamers en -tafels, spoedgevallen diensten, ziekenhuiskamers, etc.) in medische, tandheelkundige en diergeneeskundige praktijken).

- **MULTI-SURFACE** Reinigt alle oppervlakken zonder een spoor achter te laten. Niet corrosief. Compatibel met alle materialen.
- **SNEL** De enzymen snijden het vuil af en breken het af, waardoor het sneller en met minder moeite kan worden gereinigd.
- **«DEEP CLEAN»** De Enzymen verwijderen zichtbaar en onzichtbaar organisch vuil op een efficiënte en moeiteloze manier. Ze helpen ook om zich te ontdoen van het Coronavirus en gevaarlijke bacteriën. enziSurf® bestrijdt onaangename geuren..
- **«VOORKOMEN»** De enzymen vormen een afstotende laag, zodat het vuil zich niet snel opnieuw vastzet
- **«NATUURLIJK»** enziSurf® biedt een gezond alternatief voor conventionele reinigingsmiddelen, om personeel en de patiënten te beschermen met ingrediënten van natuurlijke oorsprong (geen fosfaten, bleekmiddel of ammoniak).

Toepassingen

- Kritische oppervlakken
- Tafels
- Operatietafels
- werkoppervlakken
- Burelen
- Vloeren
- Gangen

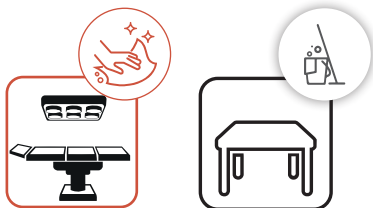

Kenmerken van het product

- Sterk geconcentreerde formulering waarin grondstoffen van plantaardige oorsprong worden gecombineerd met enzymen voor een grotere efficiëntie
- Niet-agressief voor de gebruiker en de apparatuur die ermee in contact komt (compatibel met alle materialen)
- Biologische afbreekbaarheid >97% in 28 dagen (OESO 302B)
- Zeer actief enzymencomplex Geurloos
- Kleurstofvrij
- Dieptereiniging



Gebruiksaanwijzingen

Reiniging is een essentiële stap in de bestrijding van infecties.

1. Verdun het product als volgt in **warm water**:

- **2x30ml** in **5L warm water** of
- **120ml** in **10L warm water**


Aanbevolen gebruikstemperatuur tussen 35-50°C

2. Breng het product aan op de te reinigen oppervlakken
3. Borstel indien nodig.
4. Laat het drogen.

OPMERKING: zorg ervoor dat u de kritische oppervlakken die in contact zijn met patiënten, regelmatig schoonmaakt. Naast het reinigen wordt aanbevolen om te desinfecteren om het ontsmettingsproces te voltooien. Echter, de Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om spaarzaam te zijn met desinfectie om anti microbiële resistentie (AMR) te bestrijden

Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Kan naar een waterzuiveringsinstallatie afgevoerd worden.

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen: Als de containers volkomen leeg zijn, zijn deze recycleerbaar.

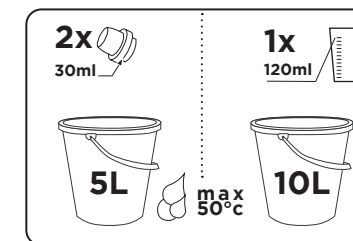

Chemische eigenschappen

Uiterlijk: licht gele vloeistof

Voorzorgsmaatregelen

Opslag in gesloten originele verpakking, tussen + 4 ° C en + 25 ° C

Levensduur: 24 maanden na productie

Bestanddelen

Samengesteld uit natuurlijke ingrediënten 99%
Bevat geen kankerverwekkende, mutagene agentia, reproductietoxische stoffen of hormoon ontregelaars.

Enzymatisch complex:



Verpakking:



Enzymes for patients' safety

Contact:

OneLife s.a.
Avenue Albert Einstein, 15
1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
+32 10 48 34 27 info@onelif-bf.com

onelif-bf.com