



DETECT & DISSOLVE  
BIOFILM MATRIX

# Detect<sup>2</sup>






## Kwaliteitscontrole van het reinigingsproces van chirurgische instrumenten.



- Kwaliteitscontrole hulpmiddel voor optimalisatie van het reinigingsproces
- Gepatenteerde en gevalideerde technologie voor het opsporen van eiwitresten en biofilms op het instrumentarium
- Snel resultaat, verkleuring direct zichtbaar op het oppervlak van het instrument (5 minuten)

### Exclusieve Toepassingen

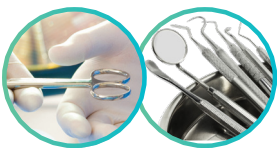

Tandheelkundige en chirurgische instrumenten


### Kenmerken van het Product

- Snel en eenvoudig te gebruiken: 5 minuten voor een instrumentennet (DIN 1/1)
- Controleer de kwaliteit van de reiniging met was- desinfectie machines.
- Hoge detectie gevoeligheid (vanaf 10µg/cm<sup>2</sup> eiwitten).
- Eén reagent voor het detecteren van resterende eiwitten (KLEURMIDDEL).
- Compatibel met roestvrij staal, PP, PTFE, POM, aluminium, titanium.
- Geregistreerd als Medical Device Class I.
- Biologische afbreekbaarheid ≥ 90% (OCDE 302B).
- Zeer lage toxiciteit (verslag beschikbaar op aanvraag).
- Geurloos



## Gebruiksaanwijzingen

1. Dompel de instrumenten onder in het KLEURMIDDEL gedurende **5 minuten**
2. **Spoelen:** onderdompelen in kraanwater
3. Visuele interpretatie van het resultaat: Blauwe vlekken vertonen eiwitresten/ biofilmcontaminatie op de instrumenten

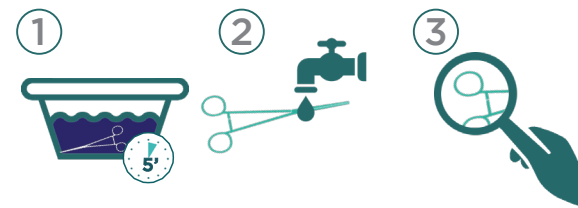

**Afvalverwerkingsmethoden:** Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

**Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen:** Afval niet in de gootsteen werpen. Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor bijzonder afval brengen.

### Chemische Eigenschappen

Uitzien:	donker blauwe vloeistof
Dichtheid:	1,013 +/- 0,01
pH:	2,25 +/- 0,25

De natuurlijke kleur van het product kan variëren van lot tot lot zonder de prestaties van het product te beïnvloeden.

### Bestanddelen

Citroenzuur: 1-5%  
KLEURMIDDEL: 0,1-1%  
Zonder alcohol

Bevat geen kankerverwekkende, mutage-ne agentia, reproductietoxische stoffen of hormoon ontregelaars.

### Voorzorgsmaatregelen

- **Draag handschoenen en beschermende kleding tegen het KLEURMIDDEL.** Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.
- **Bescherm** het werkoppervlak.
- **Bewaar** in de gesloten originele verpakking, tussen +4°C en +25°C.
- **Levensduur:** 36 maanden na productie.

### Verpakking



Ref OL22329  
6 x 950ml



Ref OL22319  
2 x 5L



Ref OL22215  
KIT



Natural



Biodegradable



Eco-friendly

