


# Babyscope




Oxydation



Biofilm

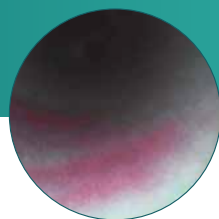

Blood stains

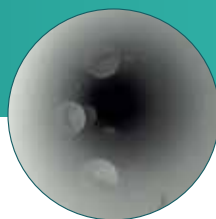

Water Drops



Kink



# Babyscope

## Inspectie camera voor flexibele en starre endoscopen, of instrumentarium met lumina

- Eenvoudige en snelle inspectiecamera
- Helpt verontreiniging en schade te detecteren, waardoor onmiddellijk correctieve maatregelen kunnen worden genomen

### Exclusieve Toepassingen

#### Endoscopen



- « Plug & Play »
- Nauwkeurige inspectie van de werkkkanalen vanaf 2 mm diameter
- Verlengt de levensduur van flexibele endoscopen
- Hoge resolutie afbeeldingen
- Lengte : 110 cm
- Stevig handvat met eenvoudige interface
- Neemt foto's en video's op
- Software inbegrepen
- Kan worden gereinigd/ gesteriliseerd

#### Instrumentarium met lumina



## Gebruiksaanwijzingen

Voor gedetailleerde stappen, zie gebruikershandleiding die geleverd is bij het apparaat

1. Voordat u de camera aansluit, Installeer de software met behulp van de USB-stick (op een PC)
2. Babyscope aansluiten :  
Neem de ronde aansluitkabel en sluit deze aan op de camera  
Sluit de USB-aansluiting aan op de USB-poort van uw pc  
Open de Healthmark Scope Viewer-software en begin met de inspectie
3. Trek langzaam de flexibele slang van de camera door de lumen van het instrument of door het kanaal van de flexibele endoscoop via de biopsiepoort of de distale tip  
Alle kanalen met een minimumdiameter van 2 mm kunnen worden geïnspecteerd, maar er mag geen kracht worden uitgeoefend als de doorgang van de slang moeilijk is
4. De camera moet gedecontamineerd worden na elk gebruik



## Eigenschappen

- Optische vezel
- LED licht bron
- 120° zicht
- Camera van 1,9 mm diam. gevestigd aan de distale tip van de slang
- Lengte van de flexibele slang : 110 cm, met markering elke centimeter
- Knop om het licht aan te passen
- Knop om foto's te nemen of te filmen
- Witbalans knop • Aansluiting van de camera op de computer met USB-kabel

#### Accessoires :

- Verbindingskabel
- USB-stick (software & gebruiksaanwijzingen)
- Waterdichte afsluitkap

## Voorzorgsmaatregelen

- Voorzichtig behandelen, de slang mag niet worden geplooid
- Reinig / desinfecteer de Babyscope na gebruik met een reinigings- en desinfectiedoekje
- De babyscope kan ook worden gereinigd net als een flexibele endoscoop, gebruik de waterdichte afsluitkap voordat u hem onderdompelt
- Bewaar het instrument op een propre, droge en geventileerde plaats, aan een temperatuur tussen -20 en 60 °

## Verpakking



Ref OL21822



Enzymes for patients' safety

### Contact:

OneLife s.a.  
Avenue Albert Einstein, 15  
1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)  
+32 10 48 34 27 info@onelif-bf.com

onelif-bf.com